



# PHAGO'SPORE

**Nettoyant désinfectant sporicide  
pour les sols et les surfaces hautes,  
et les surfaces des dispositifs médicaux non invasifs**



## Points forts

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide (actif en 10 minutes sur *C. difficile* et en 5 minutes sur Norovirus)
- ✓ Respect de l'environnement (substance active : acide peracétique)
- ✓ Produit «contact alimentaire» (conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999)

## Conditionnements

Présentation	Code	Nombre d'unité par carton
Flacon de 750 ml	65003	6 unités
Bidon de 5 litres	65007	2 unités





# PHAGO'SPORE

## Domaine d'application

- ✓ Le **PHAGO'SPORE** est un produit détergent désinfectant pour toutes surfaces, incluant les surfaces des dispositifs médicaux non invasifs.
- ✓ Le **PHAGO'SPORE** peut être utilisé, avec rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999).
- ✓ Le **PHAGO'SPORE** est formulé à partir d'une substance active (acide peracétique) garantissant une efficacité microbiologique à large spectre tout en assurant un respect de l'environnement par sa biodégradabilité en acide acétique, oxygène et eau.
- ✓ Le **PHAGO'SPORE** a une tête de pulvérisateur mousse dense permettant d'éviter la formation d'aérosol et de protéger l'utilisateur.

## Composition

- ✓ Actif désinfectant :
  - acide peracétique (N° CAS 79-21-0 ; 0,034% m/m)
  - Peroxyde d'hydrogène (N° CAS 7722-84-1 ; 3,26% m/m)
- ✓ Parfum

## Caractéristiques organoleptiques et physicochimiques

- ✓ Aspect : liquide
- ✓ Couleur : incolore
- ✓ Parfum : menthe
- ✓ pH pur à 20°C : 2,00
- ✓ Masse volumique à 20°C : 1,000 – 1,020 g/cm<sup>3</sup>

## Mode d'emploi

- ✓ Le **PHAGO'SPORE** est prêt à l'emploi.
- ✓ Le **PHAGO'SPORE** peut être utilisé pour la désinfection des sols en suivant le protocole des bandeaux d'imprégnation (1L pour 5 bandeaux)
- ✓ Pulvériser sur un linge à usage unique et/ou appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer\*
- ✓ Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide ou 15 minutes pour un spectre complet.

\* Dans le cas de désinfection de surfaces pouvant entrer en contact direct avec les denrées alimentaires, un rinçage à l'eau potable est nécessaire (arrêté du 8 septembre 1999)

Utiliser les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

## Recommandations

- ✓ Utiliser des gants et un vêtement de protection approprié
- ✓ Eviter de faire ruisseler le produit.
- ✓ Péréemption: 18 mois à partir de la date de fabrication.
- ✓ Au contact de l'air, dans un récipient ouvert (seau, bac...), le produit est stable 3 jours.
- ✓ La fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

## Activité antimicrobienne

Normes	Concentration	Temps
<b>BACTERICIDE</b>		
<b>EN 1276</b> cond. saleté ( <i>P.aeruginosa</i> et <i>E.hirae</i> )	80%	1 min.
<b>EN 13697</b> cond. saleté ( <i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i> et <i>E.hirae</i> )	10 %	5 min.
<b>EN 13727</b> cond. saleté ( <i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> et <i>E.hirae</i> )	8 %	5 min.
<b>FONGICIDE</b>		
<b>EN 13697</b> cond. saleté ( <i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i> )	100 %	15 min.
<b>EN 1650</b> cond. saleté ( <i>Aspergillus</i> )	80 %	15min.
<b>VIRUCIDE</b>		
<b>prEN 14476 : 2011</b> cond. saleté (Poliovirus type 1)	100 %	15 min.
<b>prEN 14476 : 2011</b> cond. saleté (Adenovirus type 5)	100 %	5 min.
<b>prEN 14476 : 2011</b> cond. saleté (Norovirus murin)	100 %	5 min.
<b>SPORICIDE</b>		
<b>EN 13704</b> cond. propreté ( <i>C. difficile</i> )	100 %	10 min.
<b>EN 13704</b> cond. propreté ( <i>B. subtilis</i> )	80 %	15 min.
<b>EN 13697</b> cond. saleté ( <i>C. difficile</i> , forme sporulée)	50 %	15 min.

