

# Masque chirurgical Type IIR, 3 plis, à élastiques

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Personnel



Patients



Visiteurs



## Description produit:

- Demi-masque filtrant, 3 plis, à élastiques
- A usage unique, non stérile
- Soudure par ultrasons
- Attache par élastiques résistants
- Barette nasale réglable
- 1 coloris disponible: Bleu

## Domaines d'application:

- Porté par la patient atteint d'une infection respiratoire, le masque protège son entourage du risque infectieux.
- Porté par le personnel soignant et/ou les visiteurs, le masque protège les patients sensibles d'un éventuel risque infectieux.

## Informations réglementaires:

- DM 93/42/EEC, classe I
- EN 14683:2019

## Caractéristiques techniques:

COMPOSITION			DIMENSIONS
Couche extérieure	Couche intérieure	Filtre	17,5 x 9,5 cm
100% PP Spunbond 25 g/m <sup>2</sup>	100% PP Spunbond 25 g/m <sup>2</sup>	100% PP Melt-blown 25 g/m <sup>2</sup>	

# Masque chirurgical Type IIR, 3 plis, à élastiques

## PROTECTION DE LA PERSONNE

### Données réglementaires:

#### NF EN 14683:2019 (Rapport 20R001597MO)

Donnée à renseigner	Référentiel	Niveau exigé	Valeur minimum
Efficacité de filtration bactérienne (BFE)	EN 14683: 2019+AC: 2019 Annex B	≥ 98%	99,26 %
Delta P	EN 14683:2019+AC:2019 Annex C	< 60 Pa/cm <sup>2</sup>	27,1 Pa/cm <sup>2</sup>
Splash resistance	ISO 22609:2004	≥ 16 kPa	≥ 16 kPa
Propreté microbienne	EN ISO 11737-1:2018, Membrane filtration	≤ 30 cfu/g	8 cfu/g


### Données logistiques:

Référence	Boîtes / carton	Unités : boîte / carton
1000020596	40	50 / 2000
Dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton
17,5 x 9,5 cm	18 x 10 x 7 cm	52 x 38 x 30 cm
Poids carton (brut)	Poids carton (net)	Fabrication
7,5 kg	6,5 kg	Chine
EAN boîte	EAN carton	
3700901329954	3700901329961	
Durée de vie	3 ans	
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.	

# Masque chirurgical Type IIR, 3 plis, à élastiques

PROTECTION DE LA PERSONNE

Conditionnement boîte:

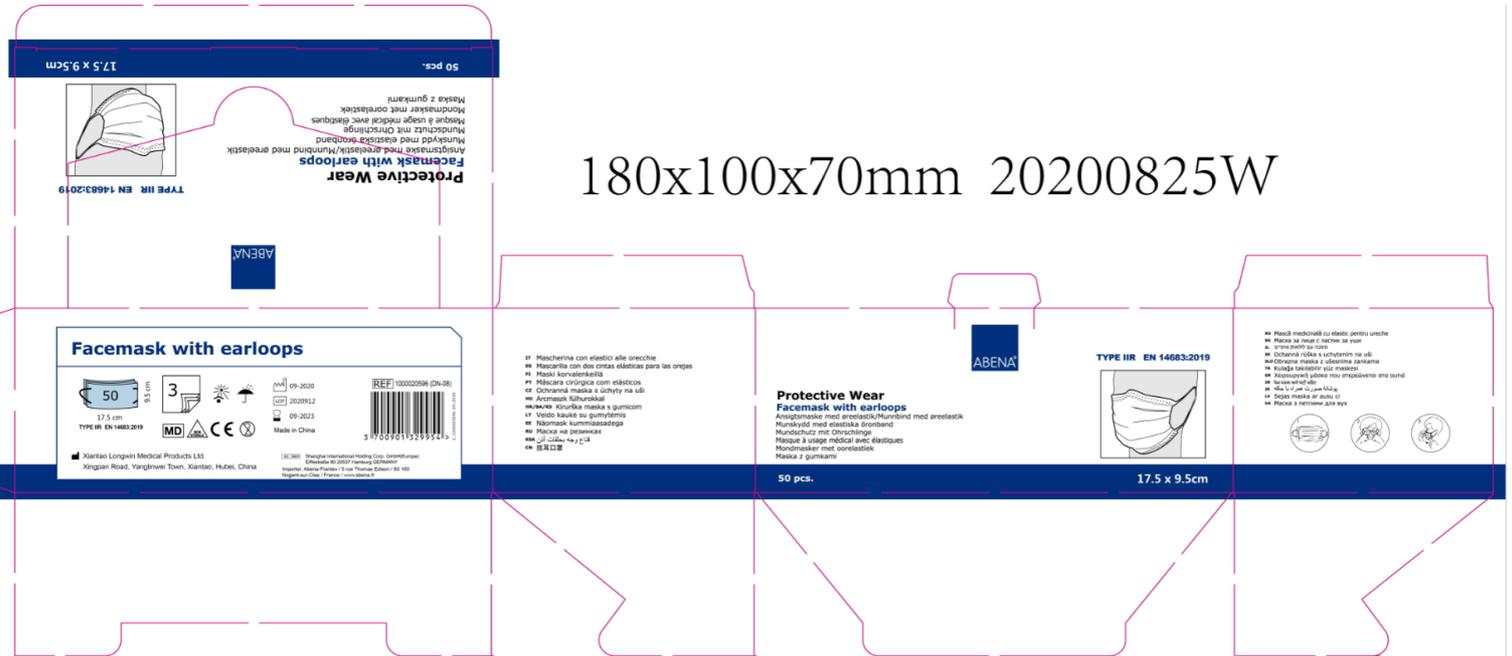

Conditionnement carton:

## 52X38X30CM



# Masque chirurgical Type IIR, 3 plis, à élastiques

PROTECTION DE LA PERSONNE

Notice d'utilisation présente dans chaque boîte:

ABENA®

## Notice d'utilisation: Masque chirurgical à élastiques



1 Avant de toucher le masque, lavez-vous ou désinfectez-vous les mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique.



2 Vérifiez l'état général du masque avant mise en place. Assurez-vous que celui-ci ne présente aucun défaut (trous, déchirures...). Avant application sur le visage, repérez le sens correct du masque. Généralement, face colorée à l'extérieur.



3 Repérez la barrette nasale et placez-la au niveau de la vouute du nez.



4 Passez les élastiques autour des oreilles pour fixer le masque.



5 Tirez le masque vers le bas et déployez le sous le menton. Ajustez l'ensemble et assurez-vous de bien couvrir la bouche et le nez.



6 Finiez la barrette nasale à l'aide de votre pouce et index pour mouler le masque au plus près du visage.



7 Veillez à retirer le masque sans toucher la partie centrale qui pourrait être contaminée. Utilisez les élastiques pour le saisir et le jeter proprement.



8 Dès que vous l'avez retiré, jetez le masque en toute sécurité dans une poubelle fermée prévue à cet effet sans toucher le couvercle.



9 De nouveau, lavez-vous ou désinfectez-vous les mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique.



Évitez de toucher le masque pendant toute la durée d'utilisation. Si vous le faites, lavez-vous ou désinfectez-vous les mains immédiatement.



Remplacez le masque dès l'apparition des premières traces d'humidité. Ne pas le réutiliser.

L100001903 2023/04/2021

[www.abena-frantex.fr](http://www.abena-frantex.fr)

